



## Kort instruktion LIV<sup>®</sup>

(Arbetstemperatur -20° C till +45° C)

- Används endast tillsammans med utrustning avsedd för denna ventil.
- Förbered byte av gasflaska när tryckmätarens visare går in i det röda området.

### Före användning:

Kontrollera tryckmätaren (1)

Kontrollera att flödesväljaren (5) är inställd på 0

Se till att inget är anslutet till snabbkoppling eller slangnippel (3 och 4)

Öppna långsamt avstängningsventilen (2) helt (vrid moturs)

Anslut utrustning (3 eller 4)

Välj flöde (5) endast om utrustning är ansluten till slangnippeln (4)

### Efter användning:

Stäng avstängningsventilen (2) (vrid medurs)

Koppla bort utrustningen (3 eller 4)

Kontrollera att flödesväljaren (5) står på noll

MRI-KOMPATIBEL

Elektrostatiskt fält  $\leq 3,0T$

Ventilen ska befinna sig minst 30 cm från magnetöppningen