

Etikettguide, Klinisk kemi och farmakologi (KKF)

Rätt placerad etikett– säkrare provhantering och snabbare svar.

Den ökade automationen på KKF kräver korrekt placering av BoS-etiketter på provrör. Provrör som kommer till KKF hanteras av en provsorteringsrobot. Det är av största vikt att BoS-etiketterna sitter korrekt för att de ska kunna hanteras av roboten. Rätt placerad etikett ger snabbare svar och minskar risken för att prov förolyckas.

Gör så här

1. Kontrollera att BoS-etiketterna är korrekta.
2. Placera BoS-etiketten längs med röret nära proppen med remissnumret närmast proppen, se bild nedan.
3. Sätt BoS-etiketten rakt på röret, täck befintlig röretikett, och lämna en spalt så att ni och vi ser blodmängd och fyllnadspilar.
4. Var noga med att hela etiketten fäster ordentligt på röret annars finns det risk för att rören hakar sig i automationsbanan.
5. Propparna på blodrören bör inte tas av och sättas på igen. Det innebär risk för läckage av blod från provröret in i automationsbanan. Om proppen har tagits av och åter satts på provröret måste den informationen delges oss på KKF. Sätt gärna en post-it-lapp virad kring röret med texten: OBS! proppen har varit av.



Provrören korrekt märkta och i korrekt provtagningsordning, från vänster till höger.

Felkällor

- Felaktigt utskrivna BoS-etiketter (information hamnar utanför sin etikettdel eller saknas), kontrollera att etiketrullen sitter korrekt fastlåst i skrivaren, skriv ut nya.
- Upp-och nedvända etiketter eller etiketter snurrade runt röret.
- Etikett på fel provrör eller ej skickad remiss i Cosmic.
- Skadade etiketter, text eller streckkod har förstörts av sprit eller vatten.
- Kapillärrör märkta med den stora provtagningsetiketten.