



Quantiferon - Information till vårdenhet

Klinisk mikrobiologi vid Akademiska sjukhuset kommer införa Quantiferon-analysen som en del av det egna analysutbudet. Syftet är även att förenkla provtagningen så att man framgent enbart behöver ta ett rör för analysen. Nuvarande rutin med fyra rör kommer därför under en period att jämföras med det enklare förfarandet med ett rör, innan vi i början av 2023 kan övergå till enbart det senare. Under övergångsperioden vid införandet kommer vi fortsatt skicka prover till Karolinska Sjukhuset som tidigare.

VIKTIGT! Patienten måste ha gett sitt medgivande till biobankslagring och valet vara ikryssat i Cosmic för att vi ska kunna använda proverna.

Gör så här:

- 1/ Gör beställningen i Cosmic som vanligt.
- 2/ Provtä för Quantiferon i enlighet med nuvarande rutin (4 rör).
- 3/ Fyll även ett 5:e vacutainerrör med **5 - 6 mL** helblod. Vacutainerrör med innehåll av litium- eller natriumheparin som antikoagulant.



Varuförsörjningens artikelnummer 61101



Varuförsörjningens artikelnummer 61109

Se även i dokumentet [Venprovtagningsrör](#).

Vänd försiktigt röret några gånger för att lösa upp litium eller heparinkristaller, blodrören ska förvaras och transporteras i rumstemperatur ($22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$), märk röret med den femte etiketten som kommer med vid Cosmicbeställningen.

Om provtagning görs med fjärlsnål och ett "slaskrör" används för att få fart på slangar kan detta slaskrör med fördel skickas till oss, bara det är rätt rörtyper och fyllt med 5 - 6 mL blod.

Mikrobiologen vill inte att prover skickas på fredagar. Detta för att vi ska kunna ta hand om proverna på korrekt sätt.

För frågor

Kenneth Nilsson
Överläkare
018-611 90 81

Katarina Wallménus
Mikrobiolog
018-611 06 24

Petra Sandell
Informatör
018-617 38 83