



Avföringsprov, F- Calprotectin

Förberedelser

- 1 BoS-etikett
- 1 specifik provtagningsburk, art.nr 44927.
Burk med en provtagningsked i locket.
- Rent engångskärl (rondskål av papp) för uppsamling av feces.



Gör så här när patienten lämnat avföring:

1. Öppna provtagningsburken.
Använd provtagningsskeden som sitter i locket till att föra över feces till röret. Fyll burken till hälften.
2. Sätt på locket och skruva igen så att det sluter tätt.
3. Märk provtagningsburken med BoS-etikett.
4. Ange korrekt provtagningsstid (datum och klockslag) när beställningen skickas i Cosmic alt. medsänd provtagningshuvudet med korrekt provtagningsstid när provet skickas till laboratoriet om beställningen redan var skickad när provet togs.
5. Lämna in provtagningsburkarna till laboratoriet snarast, dock senast inom 3 dagar efter provet tagits. Provtagningsburkar med avföring förvaras i kylskåp (rekommenderas) eller i rumstemperatur.