



Förenklad provtagning i ett rör för QuantiFERON (Tuberkulosantigen)

Förberedelser

Provtagning av blod inför analys av tuberkulosantigen- frisättande interferon gamma svar (QuantiFERON).

Provtagande enhet tar provet i ett rör, i stället för som tidigare i fyra rör. Proverna analyseras sedan av laboratoriet i QuantiFERON-rör.

Material:



Na-heparin rör 7 mL

[Varuförsörjningens artikelnummer 61109](#)

Vid brist på rör mörkblå 7 kan nedanstående rör användas:



Li-heparin rör 4,5 mL (skicka 2 st rör/patient)

[Varuförsörjningens artikelnummer 61101](#)

Gör så här

1. Fyll alltid röret helt
2. Centrifugera **INTE** röret
3. Kylförvara provet
4. Skicka provet kylt med vanlig transport
5. Provet måste ankomma till laboratoriet inom 48 timmar

Provmottagningen är öppen vardagar mellan 8 – 16:30

Telefon: 018-611 26 44