



Urinprov för testremsa, graviditetstest och albumin (stickprov)

Ta ett stickprov av färsk urin, helst morgonurin. Blåsinkubation i minst 4 timmar är önskvärt och främst viktigt för analys av nitrit. Med stickprov avses morgonurin eller annat stickprov taget vid slumpmässig tidpunkt. Provet skall tas som ”mittstråleprov”.

Patienten ska inte ta vitaminpreparat innehållande askorbinsyra (C-vitamin) under dygnet före provtagning. Prov bör inte tas under menstruation.

Förberedelser

Du behöver:

- en engångsmugg till patienten att kissa i
- ett till två vakuurrör med beige propp 7 mL, beroende av vilka analyser som ska utföras. Ett rör per Cosmic-etikett.
- hållare med överföringsrör för urin
- BoS-etiketter

Gör så här

1. Märk engångsmuggen med personnummer och namn.
2. Märk vakuurröret (beige propp) med streckkodsetikett.
3. För ner strået på hållaren i urinen i engångsmuggen och tryck vakuurröret mot backventilen så att vakuurröret fylls med urin.
4. Lämna urinprovet till laboratoriet inom 4 timmar. Prov ska förvaras i kyl fram till transport

Överföring av urin till ett vakuurrör

