
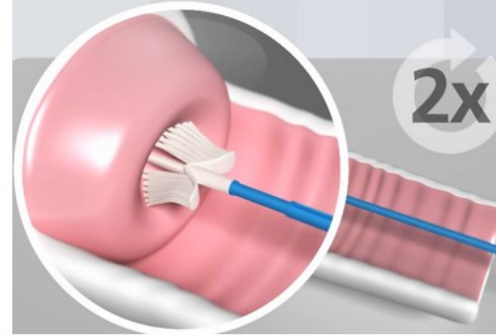


# Metodbeskrivning

1. För in borstens spets i endocervikala kanalen tills borsten ligger mot yttre livmoderhalstappen.

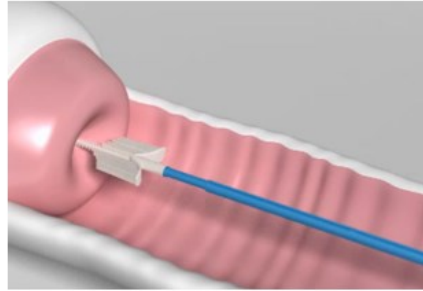

2. Använd lätt tryck och rotera borsten **två** varv medurs.

3. För ner borsten i den stora öppningen. Separera borsthuvudet från skaftet genom att haka fast borsten under den inre kanten i burken, vrid skaftet 90 grader och dra uppåt. Borsten faller då ner i fixeringslösningen. Skruva på locket.



4. Märk burken med patientens namn och personnummer (rosetiketten). Etiketten ska placeras över den befintliga etiketten. Var observant så rosetiketten täcker QR-koden men ej täcker diket på burken. Då kan burken fastna i apparaten.



Fäst etiketten här.  
Obs! täck QR-koden


Täck ej över här!



## AKADEMISKA SJUKHUSET

## Sammanfattning

### 1. Ta prov

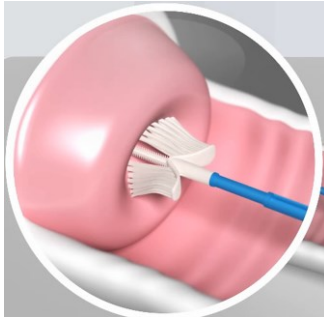

För in borstens spets i endocervikala kanalen. Roterar borsten **2** varv med ett lätt tryck.

### 2. Borsten i burken



För ner borsten i den stora öppningen. Haka fast borsten under den inre kanten, vrid skaftet 90 grader och dra uppåt.

### 2. Skicka burken



Märk burken med ros-etiketten. Lämna diket på sidan fritt. Skicka in burken.