



2022-10-17

Pinnen ska vara kvar i eSwab röret - bakterieanalyser

Klinisk mikrobiologi har senaste tiden fått in många prover som felhanterats vid provtagning med **bakteriologisk** frågeställning till skillnad från vid virusdiagnostik (se nedan). Felhanteringen gäller främst prover tagna i eSwab-rör. **Efter provtagning ska pinnen stoppas ned i transportvätskan, brytas av vid markeringen och skickas med i röret.** Pinnen behöver följa med för att analysen ska kunna genomföras korrekt. Analys av vätska från rör utan pinne kan ge högre risk för falskt negativa svar.

Pinnen får **EJ** slängas utan ska medfölja i provröret till laboratoriet.



eSwab

Provtagningsset flytande för bakterier
[Varuförsörjningens artikelnummer 48245](#)



eSwab

Provtagningsset (Nph) flytande för bakterier
[Varuförsörjningens artikelnummer 54058](#)

OBS!

Provtagning där pinnen ska slängas gäller främst virusprovtagning. Vid analys av *Luftvägsvirus* är detta extra viktigt då proverna automatpipetteras och pinnen utgör ett hinder. Läs alltid provtagningsanvisningarna/information om specifik provtagning om ni är osäkra.

Kenneth Nilsson

Öl, Doc

Avd för Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset